

## EYE DEFINITION OXYGEN PLUS Multifocal

Multifocal Contactlenzen



GEBRUIKSAANWIJZING – DEZE FOLDER BEVAT BELANGRIJKE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDS-INSTRUCTIES. LEES ZE AANDACHTIG EN BEWAAR DE FOLDER ZODAT U HEM LATER NOG KAN RAADPLEGEN. CONTACTLENZEN DIENEN STEEDS TE WORDEN Aangepast DOOR EEN OOGZORGSPESIALIST. HET IS VAN ESSENTIEEL BELANG DE AANWIJZINGEN VAN DE OOGZORGSPESIALIST OP TE VOLGEN EN OOK ALLE INSTRUCTIES VAN DE PRODUKTVERPAKKING VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN UW CONTACTLENZEN.

### BENAMING PRODUCT

**EYE DEFINITION OXYGEN PLUS Multifocal**

### MATERIAAL EN VERPAKKING

**EYE DEFINITION OXYGEN PLUS Multifocal** multifocal zachte contactlenzen bevatten 67% lotrafilcon B en 33% water en worden bewaard in een phosphate gebufferde zoutoplossing met 1% Copolymer 845. De lenzen hebben een lichtblauwe tint om ze beter te kunnen hanteren; de tint bevat Cu-phthalocyanine.

De lenzen worden met stoom gesteriliseerd.



**EYE DEFINITION OXYGEN PLUS Multifocal** worden verpakt in strips van individuele blisters.



VERZEGELDE SLUITING: Enkel gebruiken indien de blister intact is.

### GEBRUIKSDOEL

**EYE DEFINITION OXYGEN PLUS Multifocal** zijn aangewezen voor de optische gezichtscorrectie van personen met gezonde ogen en die additionele correctie nodig hebben voor presbyopie. **EYE DEFINITION OXYGEN PLUS Multifocal** zijn voor overdag dragen (dagelijkse draagtijd: minder dan 24 uur, niet tijdens de slaap), zoals bepaald door uw oogzorgspecialist.

### AANBEVOLEN SCHEMA VOOR HET DRAGEN EN DE VERVANGING VAN DE LENZEN

Opdat de gezondheid en veiligheid van uw ogen zouden worden gerespecteerd, dient het draagschema door uw oogzorgspecialist te worden bepaald. **EYE DEFINITION OXYGEN PLUS Multifocal** niet dragen tijdens het slapen.

De lenzen dienen elke maand te worden weggegooid en vervangen door nieuwe.

### MANIPULATIE VAN UW LENZEN

Uw oogzorgspecialist dient u gedetailleerde aanwijzingen te verstrekken voor het aanbrengen en het uitnemen van contactlenzen.

Steeds de handen wassen en afdrogen voordat u de lenzen aanraakt. Schud zachtjes de blisterverpakking voordat u hem opent. Trek de folie weg. Giet de lens in de palm van uw hand of, indien nodig, laat de lens voorzichtig uit de houder glijden met behulp van uw wijsvinger. Let erop dat de lens niet binnenstebuiten zit, en dat u de juiste lens voor dat oog heeft. Controleer de lenzen voordat u ze aanbrengt, niet aanbrengen indien beschadigd.

Let erop dat uw handen volledig droog zijn als u de lenzen uitneemt. Knipper volledig meerdere keren met uw ogen, en, terwijl u naar boven kijkt, schuif dan de lens naar beneden op het witte deel van het oog. Verwijder de lens door ze voorzichtig tussen duim en wijsvinger te nemen. Indien de lens zich moeilijk laat uitnemen, knijp niet in het oogweefsel. Breng comfort- of bevochtigingsdruppels aan en probeer de lens opnieuw te verwijderen na enkele minuten.

- Gebruik nooit pincetten, zuignappen, scherpe voorwerpen of uw nagels om uw lenzen uit uw ogen

te nemen of om ze uit de lenshouder te halen.

## **DE VERZORGING VAN UW LENZEN**

- CORRECTE VERZORGING VAN UW LENZEN IS ESSENTIEEL.
- DESINFECTEER uw lenzen telkens wanneer ze worden uitgenomen om schadelijke kiemen te vernietigen en om veilig en comfortabel contactlensdragen te verzekeren.
- Uw oogzorgspecialist dient het meest geschikte contactlensverzorgingssysteem voor u te selecteren.
- Lensonderhoudsproducten van andere systemen niet afwisselen of mengen.
- Gebruik alleen contactlensverzorgingsproducten voor zachte contactlenzen en volg de aanwijzingen van de fabrikant.
- GEBRUIK GEEN HITTE, NOCH PRODUCTEN VOOR HARDE OF VORMVASTE GASDOORLAATBARE LENZEN.

Neem steeds de volgende voorzorgen:

- Steeds de handen wassen, afspoelen en afdrogen voordat u uw contactlenzen aanraakt.
- Nooit de lenzen 's nachts bewaren in enkel een zoutoplossing. Zoutoplossing zal uw lenzen NIET tegen kiemen en uw ogen NIET tegen mogelijke infectie beschermen.
- Nooit de oplossing in uw lenshouder hergebruiken.
- Nooit oplossingen gebruiken waarvan de vervaldatum is verstreken.
- Spoel uw lenshouder telkens wanneer u uw lenzen eruit haalt. Gebruik steriele zoutoplossing of verse lensvloeistof en, indien van toepassing, aan de lucht laten drogen. Dit helpt besmetting en ernstige oogletsels te voorkomen.
- Vervang regelmatig uw lenshouder.

INDIEN U UW LENZEN ENKELE DAGEN NIET MEER HEBT GEDRAGEN, volg dan de instructies die werden gegeven voor het onderhoud van de lenzen en, indien van toepassing, reinig en desinfecteer de lenzen alvorens ze in te zetten.

## **WANNEER DE LENZEN NIET TE DRAGEN**

Contactlenzen dienen niet te worden gedragen bij bepaalde gezondheidstoestanden of omgevingsvoorwaarden. Conditie die veilig contactlensdragen kunnen belemmeren of verstoren, zijn onder meer:

- Allergie, ontsteking, infectie of irritatie van of rond het oog en de oogleden.
- Perioden van zwakkere gezondheid, zoals ernstige verkoudheden of griep.
- Het gebruik van sommige geneesmiddelen, inclusief oogmedicatie.
- Ontoereikende traanfilm (droge ogen).
- Uitermate droge of stoffige omgevingen die het contactlensdragen oncomfortabel maken.
- Watersporten zonder gebruik te maken van een zwembril.

Overleg met uw oogzorgspecialist betreffende deze of andere condities.

## **MOGELIJKE PROBLEMEN**

Hoewel het dragen van zachte contactlenzen heel wat voordelen biedt aan de drager, is het mogelijk dat problemen zouden kunnen optreden welke aanvankelijk kunnen worden waargenomen als één of meer van de volgende tekens:

- Gevoel dat zich een vreemd voorwerp in het oog bevindt
- Lens wordt hinderlijk
- Roodheid van de ogen
- Gevoeligheid voor licht
- Stekend of brandend gevoel, jeuk of tranende ogen
- Verminderde gezichtsscherpte
- Regenbogen of halo's rond lichtbronnen
- Toegenomen oogafscheidingen
- Ongemak/pijn
- Ernstige of lang aanhoudende droge ogen

Indien deze symptomen worden genegeerd, kan dit leiden tot meer ernstige complicaties.

## WAT INDIEN ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET?


Indien één van de bovengenoemde symptomen zich voordoet:

- **NEEM DE LENS (LENZEN) ONMIDDELIJK UIT.**
- Als het ongemak of probleem hiermee ophoudt, onderzoek de lens (lenzen) dan nauwlettend.
- Als de lens (lenzen) op welke manier ook beschadigd is (zijn), zet ze dan NIET opnieuw in, maar vervang ze door (een) nieuwe lens (lenzen) of contacteer uw oogzorgspecialist.
- Als er vuildeeltjes, een wimper of een ander vreemd voorwerp aan de lens (lenzen) kleeft, of als het probleem ophoudt en de lens (lenzen) onbeschadigd is (zijn), dan moet u de lens (lenzen) grondig reinigen, spoelen en desinfecteren/neutraliseren, alvorens ze weer in te zetten.
- Indien de bovengenoemde symptomen aanhouden na het uitnemen of het opnieuw inzetten van de lens (lenzen), neem de lens (lenzen) dan **ONMIDDELIJK** uit, neem dan dadelijk contact op met uw oogzorgspecialist. Mogelijk is het probleem toe te schrijven aan een ernstige aandoening zoals een infectie, een hoornvlieszweer (keratitis ulcerosa) of iritis. Deze aandoeningen kunnen snel erger worden en kunnen tot blijvend gezichtsverlies leiden. Minder ernstige reacties zoals abrasie, verkleuring van het epitheel en bacteriële conjunctivitis moeten correct worden behandeld om complicaties te voorkomen.
- Occasionele droogheid kan worden tegengegaan door het gebruik van comfort- of bevochtigingsdruppels. Raadpleeg uw oogzorgspecialist indien de droogheid aanhoudt.
- Als een lens vastplakt (niet meer beweegt), breng dan enkele bevochtigingsdruppels aan en wacht tot de lens vrij begint te bewegen voordat u hem probeert uit te nemen. Als de lens blijft plakken, neem dan ONMIDDELIJK contact op met uw oogzorgspecialist.

## AANVULLENDE INFORMATIE

Het risico van een mogelijk probleem kan worden verminderd door de tekens te herkennen en het advies onder: "Wat indien zich een probleem voordoet" op te volgen. Door het dragen van contactlenzen, neemt het risico op ooginfecties toe. Roken verhoogt nog meer het risico op keratitis ulcerosa bij contactlensdragers.

## BELANGRIJKE PUNTEN OM TE ONTHOUDEN


- Laat uw contactlenzen nooit door iemand anders dragen, dit kan micro-organismen verspreiden, hetgeen tot ernstige ooggezondheidsproblemen zou kunnen leiden.
- Controleer elke dag uw ogen. Uw ogen moeten er gezond uitzien, comfortabel aanvoelen en u moet goed kunnen zien.
- Het wordt aanbevolen dat contactlensdragers hun oogzorgspecialist regelmatig raadplegen, overeenkomstig diens aanwijzingen.
- Gebruik lenzen en lensverzorgingsproducten niet na de vervaldatum. 
- Bij gedimd licht kunnen dragers van getinte lenzen mogelijk een verminderde contrastgevoeligheid ondervinden. Dragers van multifocale lenzen kunnen mogelijk verminderde gezichtsscherpte ervaren in alle lichtsituaties.
- Noteer de juiste lenssterkte voor elk oog.
- Alvorens de lens aan te brengen, controleer of de lenssterkte op iedere blister overeenstemt met de benodigde sterkte voor dat oog.
- Neem altijd reservelenzen met u mee.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van zeep, lotions, crèmes, cosmetica of deodorants aangezien deze irritatie kunnen veroorzaken als ze in contact komen met uw lenzen.
- Breng uw lenzen aan **voordat** u make-up aanbrengt en neem ze uit **voordat** u de make-up verwijdert.
- Vermijd het gebruik van spuitbussen zoals haarlak in de buurt van uw ogen wanneer u lenzen draagt omdat dit irritatie kan veroorzaken.
- Vraag het advies van uw oogzorgspecialist over het dragen van contactlenzen tijdens het sporten, inclusief zwemmen.
- Neem de lenzen uit wanneer u wordt blootgesteld aan schadelijke of irriterende dampen.
- Breng contactlenzen nooit in contact met niet-steriele vloeistoffen, (inclusief leidingwater en

speeksel) daar microbiële besmetting kan optreden, hetgeen kan leiden tot permanente oogbeschadiging.

- Verwittig uw werkgever dat u contactlenzen draagt, in het bijzonder als u oogbescherming dient te gebruiken tijdens het werk.



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX USA 76134-2099

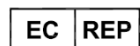

Alcon Laboratories (UK) Ltd.  
Frimley Business Park  
Frimley, Camberley  
Surrey, GU16 7SR,  
Verenigd Koninkrijk



Afkortingen voor lensspecificaties:

BC	Radius
PWR	Sterkte
DIA	Diameter
CYL	Cilinder
AXIS	As
LO	Laag
MED	Medium
HI	Hoog
ADD	Toevoeging
MAX	Maximum
L	Links
R	Rechts